

Induktions-Halsringschleife zur Hörunterstützung

Diese Halsringschleife kann anstelle eines Kopfhörers beim Audioguide und Gruppen-Führungssystem verwendet werden, um den Ton direkt in Ihr Hörgerät oder Cochlea-Implantat zu übertragen.

Anleitung Sennheiser EZT 1011

1. Für die Nutzung der Induktion wird der Kopfhörer nicht benötigt.
2. Induktionsschleife um den Hals führen.
3. Den Stecker der Induktions-Halsringschleife in die Kopfhörerbuchse des Gerätes stecken.
4. *Wichtig: Zum induktiven Hören muss das Hörgerät in den ,T'-Modus geschaltet werden (gegebenenfalls ,MT'-Modus)*
5. Bei Bedarf die Lautstärke am Multimediaguide / Gruppen-Führungssystem einstellen.
6. Viel Spaß beim besseren Hören und Verstehen unserer Angebote in der Kunsthalle!

Bei weiteren Fragen zur Verwendung Ihres Hörgerätes oder Cochlea-Implantates wenden Sie sich bitte an Ihren Hörakustiker. Wenn noch nicht geschehen, muss dieser zunächst die ,T'-Funktion für induktives Hören an Ihrem Hörsystem aktivieren.

Konzeption dieses Angebotes entstand in Zusammenarbeit mit grauwert, dem Büro für Inklusion und demografiefeste Lösungen (www.grauwert.info)

Induktions-Halsringschleife zur Hörunterstützung

Diese Halsringschleife kann anstelle eines Kopfhörers beim Audioguide und Gruppen-Führungssystem verwendet werden, um den Ton direkt in Ihr Hörgerät oder Cochlea-Implantat zu übertragen.

Anleitung Amplicomm NL 100

1. Für die Nutzung der Induktion wird der Kopfhörer nicht benötigt.
2. Induktionsschleife um den Hals führen.
3. Den Stecker der Induktions-Halsringschleife in die Kopfhörerbuchse des Gerätes stecken.
4. Schieben Sie den EIN/ AUS-Schalter auf ‚EIN‘. Das grüne Licht leuchtet auf. (Bei rotem Licht muss die Batterien gewechselt werden, bitte an die Information wenden)
5. *Wichtig: Zum induktiven Hören muss das Hörgerät in den ‚T‘-Modus geschaltet werden (gegebenenfalls ‚MT‘-Modus)*
6. Bei Bedarf die Lautstärke am Multimediaguide / Gruppen-Führungssystem einstellen.
7. Viel Spaß beim besseren Hören und Verstehen unserer Angebote in der Kunsthalle!

Bei weiteren Fragen zur Verwendung Ihres Hörgerätes oder Cochlea-Implantates wenden Sie sich bitte an Ihren Hörakustiker. Wenn noch nicht geschehen, muss dieser zunächst die ‚T‘-Funktion für induktives Hören an Ihrem Hörsystem aktivieren.

Konzeption dieses Angebotes entstand in Zusammenarbeit mit grauwert, dem Büro für Inklusion und demografiefeste Lösungen (www.grauwert.info)